



El tensiómetro digital lenz mide la presión arterial de manera automática y precisa. Su sistema con altavoz es una ayuda auditiva que facilita la interpretación de los valores medidos.

Es ideal para pacientes que deben llevar un control de su presión. Cuenta con el indicador de clasificación de los niveles de presión arterial de la OMS



### Detecta

latidos irregulares

### Promedio

de 3 últimas lecturas

### Incluye

estuche

### Garantía

3 años

### Operación

con un solo botón

### 3 x 45

memorias

### Resultados

altavoz



#### Pantalla LCD retroiluminada

Fácil lectura en condiciones de poca luz



Brazalete extralargo  
22-42 cm ancho



Fabricado bajo estándares de la OMS

#1 en  
confiabilidad

## Especificaciones técnicas

Referencia Kit	LT-P30A
Garantía	3 años
Tipo de inflado	Automático con bomba interna
Función de memoria	2 usuarios (120 memorias cada uno)
Medidas brazalete	46,5 cm de ancho
Frecuencia de pulso	30 ~ 200 bpm/±5%
Zona de medición	Brazo superior
Método de medición	Oscilométrico
Rango sistole	60 mmHg ~ 230mmHg
Rango diástole	40 mmHg ~ 130mmHg
Frecuencia de presión	0-280mmHg(0-37.3kPa) /±3mmHg(±0.4kPa)

Accesorios incluidos



Cable USB - Tipo C



Brazalete extralargo Adulto



Bolsa de transporte



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia

Almacenamiento y transporte	
Temperatura	-40 °C ~ 55°C
Humedad	≤ 93% (sin condensación)
Presión atmosférica	50 kPa ~ 106 kPa

## Partes del dispositivo



- 1 Fecha
- 2 Pantalla LCD
- 3 Botón ON/OFF

- 4 Carga de Bateria
- 5 Indicador de presión
- 6 Hora

## Cómo ponerte el brazalete de tu Tensiómetro Digital



### Paso 1

El borde inferior del brazalete debe estar a 2-3 cm del pliegue del codo.



### Paso 2

El brazalete debe estar a la misma altura del corazón.



### Paso 3

Presiona el botón de encendido y empezará la medición.

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia